

ANEXA 5

Protocol decontaminare ochelari & viziera de
protectie reutilizabile



Intreg personalul trebuie sa cunoasca:


- Cum se indeparteaza pentru dezinfectie?
- Cand se indeparteaza?
- Cum se dezinfecteaza?
- Cum si unde se colecteaza?





Cum se indeparteaza pentru dezinfectie?

- Viziera/ochelarii si masca se indeparteaza dupa iesirea din salon/ izolator
- Cu mainile igienizate/cu manusi curate, se apuca partea posterioara a sistemului de prindere (capul usor aplecat, fara sa atingem viziera/ochelarii de uniforma)

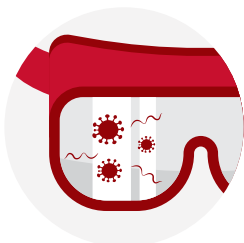


Cand se indeparteaza pentru dezinfectie?

- La final tura
- Inainte de pauza
- Daca se contamineaza (ex. stropire) sau scade vizibilitatea
- Dupa contact apropiat si prelungit cu un caz de suspiciune inalta/ confirmat cu COVID-19



Cum si unde se colecteaza?

- Coordonatorul stabileste pentru fiecare arie de lucru/sectie/zona de izolare

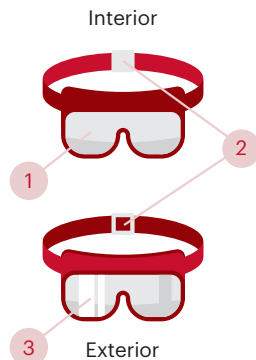

Cum se dezinfecteaza? Prin stergere:

(recomandata pentru zone/activitati cu risc scazut sau moderat)

Cu servetele dezinfectante sau imbibate in solutie dezinfectanta (ex. pe baza de alcool)

- Se incepe cu partea interioara-“curata” (1)
- Se continua cu sistemul de prindere (2)
- Se finalizeaza cu partea externa-“contaminata” (3)
- Permiteti uscarea completa (asezati pe hartie prosop de ex.)
- Indepartati manusi->igiena mainilor



Cum se dezinfecteaza? Prin imersie:

(recomandata pentru zone/activitati cu risc crescut)

- In caz de contaminare vizibila, se curata cu servetele dezinfectante
- Se imerseaza in cuva cu solutie dezinfectanta (utilizata doar cu acest scop)
- Dupa expirarea timpului de actiune, viziera/ ochelarii se clatesc
- Permiteti uscarea completa (stergeti si asezati pe hartie prosop)
- Indepartati manusi->igiena mainilor
- Dezinfectia prin imersie poate fi aplicabila (cu o periodicitate stabilita local) si pentru dispozitivele dezinfectate prin stergere!



- In masura disponibilitatii, ochelarii/ vizierele reutilizabile pot fi oferite fiecarui angajat sau pot fi disponibile in punctele de ingrijire

- Se folosesc produse dezinfectante cu actiune pe virusuri anvelopate (de ex. servetele dezinfectante, solutii preparate detergent-dezinfectant, dezinfectant de nivel inalt pentru instrumentar)

Atentie! Testati compatibilitatea materialului!